



## Gebrauchsanweisung

Kondome sollten vor jedem sexuellen Kontakt über den erigierten Penis gestreift werden und zwar bevor es zum ersten Kontakt zwischen Penis und dem Körper des Partners kommt. Nur so kann eine Ansteckung vor sexuell übertragbaren Krankheiten vermieden werden.

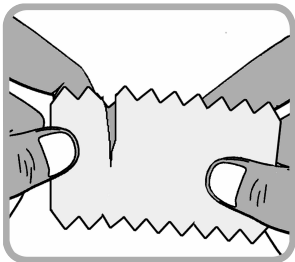

Reissen Sie behutsam das Siegelbriefchen an der Zackenkante auf. Vorsicht: Durch scharfkantige Gegenstände, Schmuck oder spitze Fingernägel könnte das Kondom beschädigt werden.

Ziehen Sie die Vorhaut ganz zurück, drücken Sie das Reservoir mit Daumen und Zeigefinger sanft zusammen, damit keine Luft eingeschlossen wird.

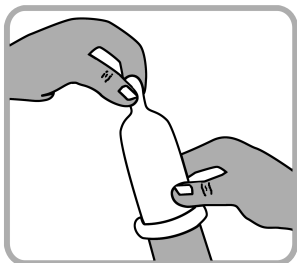

Setzen Sie das Kondom mit dem Abrollrand nach außen auf die Eichel und rollen es vollständig ab. Wenn sich das Kondom nicht abrollen lässt, haben Sie es möglicherweise verkehrt herum aufgesetzt. Drehen Sie das Kondom nicht um, es besteht die Gefahr, dass es bereits mit Sperma

in Berührung gekommen ist. Nehmen Sie ein neues Kondom.

Nach dem Samenerguss und bevor der Penis erschlafft, ziehen Sie das Kondom aus der Scheide. Halten Sie dabei das Kondom am Gliedansatz fest, damit es nicht abrutscht. Denken Sie daran, dass sowohl Penis als auch Kondom nicht mehr in Berührung mit dem Körper des Partners kommen dürfen. Gebrauchte Kondome gehören nicht in das WC. Bitte werfen Sie benutzte Kondome in den Abfall.

**Wichtig:** Kondome nur einmal benutzen. Kondome vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bitte Chargennummer und Verfallsdatum auf der Kondomfolie beachten.

**Achtung:** Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex und kann bei Personen, die auf Latex überempfindlich reagieren, eine Allergie auslösen. Falls zusätzliche Gleitfähigkeit erforderlich sein sollte, werden nur fettfreie Gleitmittel empfohlen, die im Zusammenhang mit Kondomen verwendet werden können. Benutzen Sie niemals Substanzen auf Fettbasis wie z.B. Vaseline, Babyöl, Körperlotionen, Massageöl, Butter oder Margarine als Gleitmittel, da diese das Kondom beschädigen können.

Bitte beachten Sie, dass bei gleichzeitiger äußerlicher Anwendung rezeptpflichtiger oder rezeptfreier Medikamente an Penis oder Vagina ein Arzt oder Apotheker über die Verträglichkeit mit Kondomen zu konsultieren ist. Die nicht-vaginale Anwendung von Kondomen erhöht das Risiko des Abrutschens oder der Beschädigung.

Die korrekte Anwendung von LifeStyles Kondomen hilft, das Risiko einer Schwangerschaft, einer Ansteckung mit HIV/AIDS oder anderen sexuell übertragbaren Krankheiten zu reduzieren. 100%igen Schutz kann jedoch leider kein Verhütungsmittel garantieren.

Persönliche und anonyme Online- und Telefonberatung zum Thema Safer Sex, Verhütung etc.:  
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

täglich ab 10.00 Uhr:  
01805-55 54 44  
(12 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz)

[telefonberatung@bzga.de](mailto:telefonberatung@bzga.de) oder [www.aidsberatung.de](http://www.aidsberatung.de)

Mit dem Kauf dieser Kondome unterstützen Sie die Hilfen der Deutschen AIDS-Stiftung für Menschen mit HIV und AIDS im In- und Ausland.



Jedes LifeStyles Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. LifeStyles Kondome werden nach internationalem Standard (ISO 4074:2002) hergestellt. Sie erfüllen höchste Ansprüche an Sicherheit und Zuverlässigkeit.



condomi erfurt  
produktionsgesellschaft mbH  
Tiergartenstraße 2  
99089 Erfurt



ISO 4074:2002

LifeStyles ist ein Warenzeichen der Ansell Ltd. oder eines ihrer verbundenen Unternehmen.  
© 2007 Alle Rechte vorbehalten.  
[www.lifestylescondoms.de](http://www.lifestylescondoms.de)

